

FORMADES

FLÄCHENDESINFEKTION



HACCP-konform

VAH*

kennzeichnungsfrei

alkoholfrei

SENSITIVE

Flächendesinfektion für alle Oberflächen

- DEKRA-zertifizierte
Materialverträglichkeit für Acrylglas
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- auf Basis quatärer Ammoniumverbindungen (QAV)

Einsatzbereich

Zur Desinfektion aller Oberflächen in Bereichen Lebensmittel, öffentliche Einrichtungen sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens. DEKRA-bestätigte Materialverträglichkeit für Acrylglas (z. Bsp. Fitnessgeräte, Sonnenbänke).

Anwendung

Fläche mit FORMADES SENSITIVE Lösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen, Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid (inkl. MRSA)	konz. 15 Min.	VAH/DGHM
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 1276 hohe Belastung; EN 1650 hohe Belastung; EN 13697 hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 60 Min.	EN 14348 hohe Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 5 Min.	DVV/RKI
Begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rota-Viren	konz. 60 Min.	EN 14476 hohe Belastung

Wirkstoffe

100 g enthalten:
0,113 g 2-Phenoxyethanol;
0,125 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chlorid;
0,113 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine

Hinweise

Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
Haltbarkeit geöffnet: 24 Monate

*beim VAH angemeldet (Stand 04/2021)

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Sprühflasche	500 ml	20	65709	16928939

BAuA-Reg. Nr. N-97152

pH

Stand 04/2021

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Str. 3
23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00
Telefax: 0451 - 39 39 93
E-mail: info@unizell.de

unizell

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0